


Techniques de recueil de l'urine

à partir du pot de recueil



1 **Soulever** l'étiquette blanche (ne pas la jeter).

Insérer le tube et le percuter. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

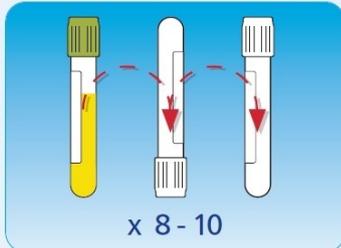


2 **Attendre** le remplissage complet et **homogénéiser** le tube par 8 à 10 retournements.



3 **Replacer** l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.


Identifier l'échantillon et le **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

à partir d'une sonde

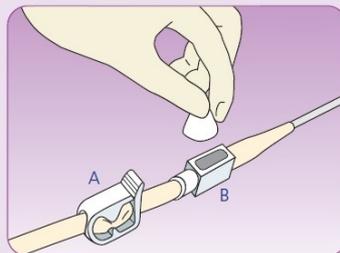


1 **Clamper** la tubulure (A). **Vérifier** la quantité d'urine présente dans la tubulure.

Désinfecter le site de prélèvement de la sonde (B) selon le protocole recommandé.

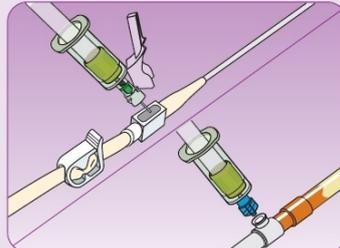


2 **Percuter** le site avec l'aiguille ou avec l'adaptateur (selon la nature du site). **Insérer** le tube et le percuter. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

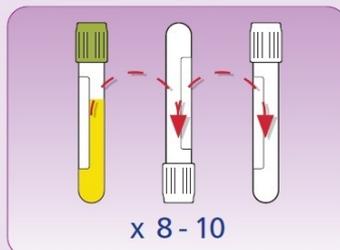

3 **Homogénéiser** le tube par 8 à 10 retournements.


Identifier l'échantillon et le **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

à partir d'une poche autocollante

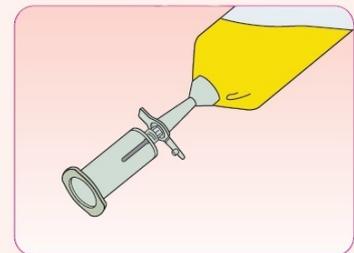


1 **Assembler** l'adaptateur luer avec le corps BD Vacutainer®.

Connecter l'adaptateur sur le site de prélèvement de la poche autocollante.

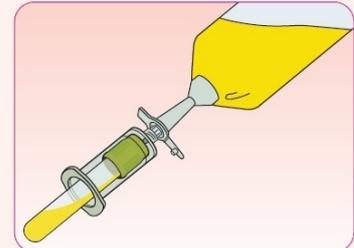

2 **Insérer** le tube et le percuter. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

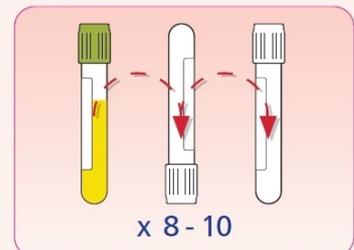

3 **Homogénéiser** le tube par 8 à 10 retournements.

Identifier l'échantillon et le **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.



Veiller à remplir le tube en fonction du niveau de remplissage indiqué sur l'étiquette.

Ordre de prélèvement des tubes



Sans additif



Bactériologie