




Prélèvement pharyngé

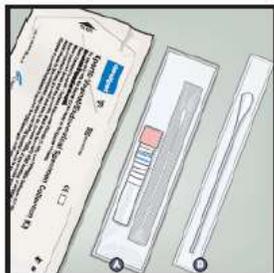


Ouvrez l'emballage du kit de prélèvement d'échantillon pharyngé individuel qui contient le tube de transport d'écouvillon fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Jetez l'écouvillon de plus grande taille.

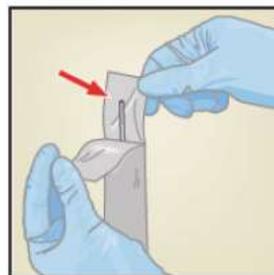


Retirez le film de protection de l'emballage de l'écouvillon de prélèvement.

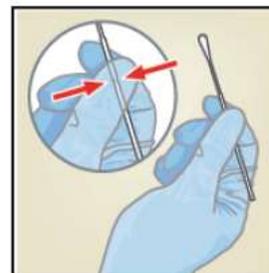


Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne de cassure.

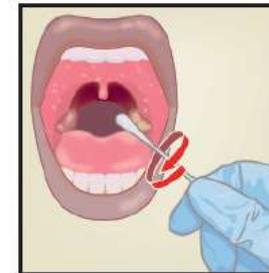


Demandez à la patiente d'ouvrir la bouche en grand. Positionnez la langue vers le bas de la bouche. Prélevez au niveau du pharynx (amygdales, paroi postérieure, luette).

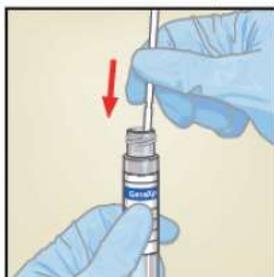

En tenant l'écouvillon dans la même main, dévissez le bouchon du tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert.

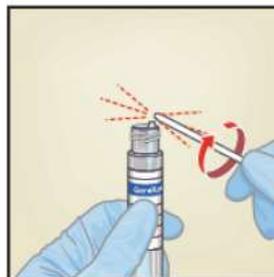

Cassez la tige de l'écouvillon contre la paroi du tube au niveau de la ligne de cassure.

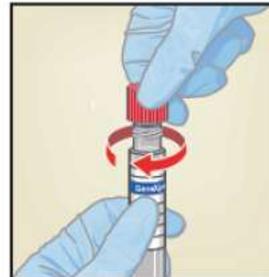


Rebouchez le tube de transport et serrez bien le bouchon.


Retournez le tube ou agitez-le délicatement 3 à 4 fois pour éluer le matériau de l'écouvillon. Évitez la formation de mousse. Étiquetez le tube de transport avec l'ID de l'échantillon, notamment la date du prélèvement, comme requis.

Évitez d'éclabousser le contenu du tube de transport sur la peau. Lavez-vous au savon et à l'eau en cas d'exposition.


Prélèvement rectal

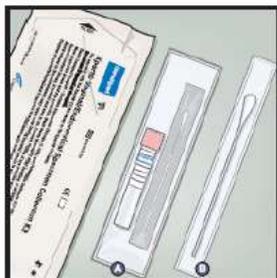


Ouvrez l'emballage du kit de prélèvement d'échantillon rectal individuel qui contient le tube de transport d'écouvillon fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Jetez l'écouvillon de plus grande taille.

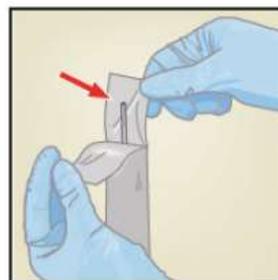


Retirez le film de protection de l'emballage de l'écouvillon de prélèvement.

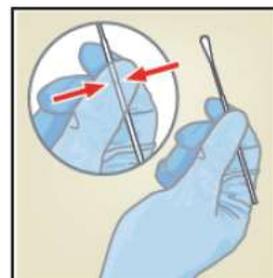


Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne de cassure.

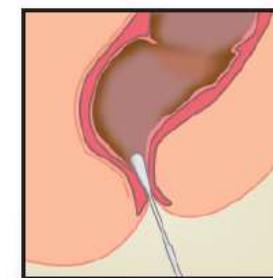


Insérez avec précaution l'écouvillon sur environ 1 cm au-delà du sphincter anal, jusqu'à ce que les extrémités fibreuses ne soient plus visibles, et faites tourner l'écouvillon délicatement.

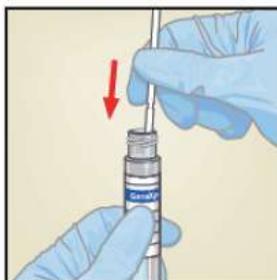

En tenant l'écouvillon dans la même main, dévissez le bouchon du tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert.

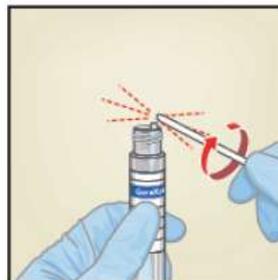

Cassez la tige de l'écouvillon contre la paroi du tube au niveau de la ligne de cassure.

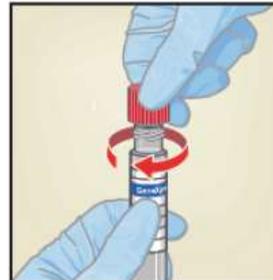

Rebouchez le tube de transport et serrez bien le bouchon.

Retournez le tube ou agitez-le délicatement 3 à 4 fois pour éluer le matériau de l'écouvillon. Évitez la formation de mousse. Étiquetez le tube de transport avec l'ID de l'échantillon, notamment la date du prélèvement, comme requis.

Évitez d'éclabousser le contenu du tube de transport sur la peau. Lavez-vous au savon et à l'eau en cas d'exposition.


Prélèvement d'échantillon vaginal (recueilli par la patiente)



1 Ouvrez l'emballage de prélèvement d'échantillon vaginal/encervical individuel **A** qui contient le tube de transport d'écouvillon fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Mettez le tube de côté. Jetez l'écouvillon de plus grande taille **B**.



2 Retirez le film de protection de l'emballage de l'écouvillon de prélèvement. Sortez l'écouvillon en prenant soin de ne pas toucher son extrémité et en évitant de le déposer sur la pailleuse.

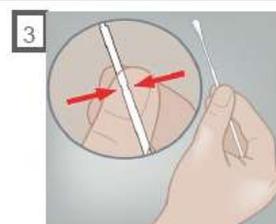


3 Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne de cassure.



4 Introduisez avec précaution l'écouvillon dans votre vagin, d'environ 5 cm (2 po) à l'intérieur de l'ouverture du vagin.




5 Tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche la paroi du vagin de manière à ce que l'écouvillon absorbe les sécrétions. Sortez l'écouvillon et continuez à le tenir de la main.

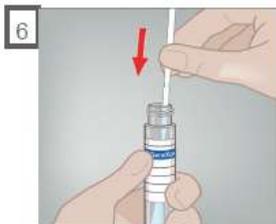

6 Dévissez le bouchon du tube de transport. Déposez immédiatement l'écouvillon de prélèvement dans le tube de transport.




7 Après avoir identifié la ligne de cassure, cassez la tige de l'écouvillon contre la paroi du tube. Jetez la partie supérieure de la tige de l'écouvillon. Évitez d'éclabousser le contenu sur la peau. Lavez-vous au savon et à l'eau en cas d'exposition.

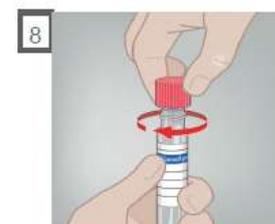


8 Rebouchez le tube de transport et serrez bien le bouchon. Restituez le tube en suivant les instructions du médecin, infirmier/ère ou prestataire de soins.


Prélèvement d'échantillon endocervical (recueilli par le clinicien)

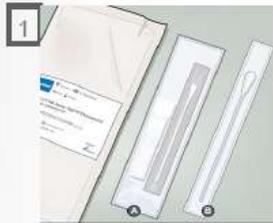


Le kit de prélèvement d'échantillon vaginal/endocervical contient
A Écouvillon de prélèvement individuel
B Écouvillon de nettoyage

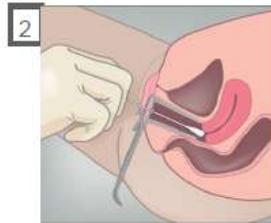


Éliminez l'excès de mucus du col de l'utérus et de la région environnante en utilisant l'écouvillon de nettoyage de grande taille emballé individuellement. Jetez l'écouvillon **B**.

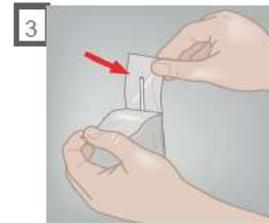

Ouvrez l'emballage qui contient le tube de transport d'écouvillon Xpert fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Retirez le film de protection de l'emballage de l'écouvillon de prélèvement.

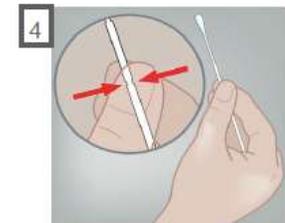


Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon.

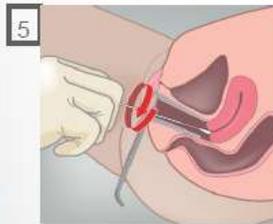

Insérez l'écouvillon de prélèvement dans le canal endocervical. Tournez l'écouvillon pendant 30 secondes, à l'intérieur du canal endocervical. Sortez délicatement l'écouvillon.



Dévissez le bouchon du tube de transport. Déposez immédiatement l'écouvillon de prélèvement dans le tube de transport.

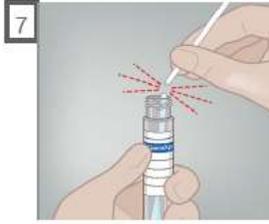

Alignez la petite encoche de la tige sur le bord du tube et cassez-la. Si nécessaire, tournez doucement la tige pour la casser complètement. Jetez la partie supérieure de la tige de l'écouvillon.



Rebouchez le tube de transport et serrez bien le bouchon. Étiquetez le tube de transport avec le n° Id de l'échantillon et la date de prélèvement, comme requis.